

femibion®

HEALTH FOR WOMEN

Intima

Pocit pohody je spojený s komfortem na těch správných místech těla. Dopřejte si víc +

Ženy rády žijí naplno, ale v jejich citlivém těle může občas dojít k nerovnováze, která vyžaduje trochu pomoci.

Vaginální gel Femibion® Intima pomáhá obnovit a zachovat přirozenou rovnováhu vaginální mikroflóry.

Vaginální gel Femibion® Intima obsahuje klinicky odzkoušenou směs speciálních prebiotik a extraktu z jetele lučního. Prebiotika spolu s jetelem lučním stimulují růst tělu přátelských bakterií. Vaginální gel Femibion® Intima poskytuje přátelským bakteriím příznivé prostředí tím, že zvyšuje hydrataci sliznice.

Vaginální gel Femibion® Intima byl vyvinut v rámci řady přípravků Femibion®, které jsou určeny pro péči o zdraví žen v každém věku a v různých obdobích jejich života.



Od okamžiku, kdy plánujete otěhotnět, až do konce prvního trimestru. Obsahuje kyselinu listovou, Metafolin®, vitamíny a jód.



Od 13. týdne těhotenství až do konce kojení. Obsahuje kyselinu listovou, Metafolin®, vitamíny, jód a DHA.



Přispívá k posílení imunitního systému a vitality. Obsahuje probiotika, koenzym Q10, železo a zinek.

Několik informací o vaginálních infekcích...

Rovnováhu vaginální mikroflóry mohou narušit hormonální změny v organismu. Mohou být způsobeny „vnějšími faktory“, např. léky, nebo užíváním antikoncepčních přípravků s nízkým obsahem estrogenu.

K nerovnováze vaginální mikroflóry mohou vést také některé „vnitřní faktory“, např. snížená hladina estrogenu po menopauze a stres.

+ Rada, jak pomoci zachovat zdravou vaginální mikroflóru.

Noste bavlněné spodní prádlo. Spodní prádlo z nylonu a lycry nepoužívejte. Bavlna absorbuje vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu.

Dbejte na intimní hygienu, ale neprovádějte výplachy pochvy. Při běžném sprchování dochází k vymytí přirozené ochranné vrstvy pochvy.

www.femibion.cz



femibion®

HEALTH FOR WOMEN

Intima

Vaginální gel v 8 aplikátorech pro jednorázové použití

Návod k použití

Pozorně si přečtěte návod k použití. Najdete v něm důležité informace o tom, jak postupovat při používání tohoto zdravotnického prostředku. Se svými případnými dotazy se můžete obrátit na svého lékaře nebo lékárníka.

Složení

Alfa-glukan oligosacharid, glycerin, extrakt z jetele lučního (Trifolium pratense extrakt, butylenglykol, lecitin, metylhydroxybenzoát, parahydroxybenzoát, sorbát draselný, tokoferol, kyselina citronová, citrát sodný, biotin), polyakrylamid (polyakrylamid, C13-C14 izoparafin, Laureth-7), benzoát sodný, sorbát draselný, kyselina L-mlečná, čištěná voda.

Fyziologické vaginální pH.

Mechanismus účinku

Vaginální gel Femibion® Intima obsahuje oligosacharid, který působí jako prebiotikum. V kombinaci s extraktem z jetele lučního stimuluje růst tělu přátelským vaginálních bakterií, a tím dochází k potlačení škodlivých bakterií. Přátelské bakterie produkují kyselinu mléčnou, která pomáhá zachovat a obnovit zdravé vaginální prostředí u dívek a žen v období puberty i v dalších obdobích aktivního života. Vaginální gel Femibion® Intima také pomáhá hydratovat poševní sliznici.

Indikace

Vaginální gel Femibion® Intima je určen pro prevenci nerovnováhy bakteriální mikroflóry a pro obnovení a zachování normální bakteriální mikroflóry. Femibion® Intima pomáhá obnovit normální vaginální mikroflóru zejména po antibiotické léčbě.

Změny vaginální mikroflóry způsobují změnu fyziologického pH a mohou také tlumit přirozené obranné mechanismy a zvyšovat riziko poševní infekce.

V důsledku této nerovnováhy se mohou objevit různé potíže, např. pálení, podráždění, nadměrný výtok, nepříjemný zápach, svědění, nepříjemný pocit na hrázi atd.

Kontraindikace

Tento přípravek nesmějí používat mladé dívky, které ještě nedosáhly pubertálního věku.

Tento přípravek nesmějí používat ženy se známou alergií na některou složku obsaženou v přípravku.

Vedlejší účinky

Mezi možné vedlejší účinky, které se objevují ve vzácných případech, patří svědění a pálení. Pokud se tyto nepříznivé účinky projeví i u Vás, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Přípravek může vyvolat místní kožní reakce nebo způsobit mírné podráždění kůže a sliznic.

Upozornění

Během používání tohoto gelu se nedoporučuje používat kondom, spermicidní prostředky, latexové vaginální diafragma (pesar) ani jakoukoli jinou formu mechanické antikoncepce (z důvodu rizika prasknutí či neúčinnosti).

Tento přípravek by se neměl používat během menstruace.

Pokud se příznaky zhorší nebo ani po 8 dnech nedošlo k jejich zlepšení, obraťte se na svého lékaře.

Přípravek nepoužívejte, jestliže jednorázový aplikátor dávky není celistvý (neporušený).

Aplikátor (tuba) je určen pouze k jednorázové aplikaci a nesmí se používat opakovaně (opakované použití může způsobit infekci).

Těhotenství a kojení

Tento přípravek nesmějí používat těhotné ženy, ale ho bezpečně používat u kojících žen.

Dávkování a způsob podání

Aplikátorem zatřete, aby gel stekl do špičky. Aplikátor otevřete na straně označené bodem lomu. Poté zaujměte pohodlnou polohu a aplikátor opatrně zavedte do pochvy. Stisknutím aplikátoru dojde k uvolnění gelu z aplikátoru. Tímto způsobem se gel dostane do míst, kde má působit. Stisk aplikátoru uvolníte až po jeho vytažení z pochvy.

Doporučujeme umýt si ruce před i po aplikaci přípravku.

F308424 / 7.03190.0013cz


Do pochvy aplikujte jednu dávku denně v průběhu 8 po sobě jdoucích dnů, a to ode dne po ukončení menstruace. Doporučuje se provést aplikaci gelu před usnutím.

Každý aplikátor je určen pro jednu aplikaci. 

Pro dosažení trvalého výsledku se doporučuje opakovat tuto 8denní léčbu každý měsíc, a to po dobu 3 měsíců.

Další informace

Skladujte při teplotě v rozmezí 0 °C až 30 °C. 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí data expirace (použitelnosti), které je uvedeno na krabici a na jednotlivých aplikátorech vedle symbolu. 

Číslo šarže je uvedeno na aplikátoru vedle symbolu. (LOT = ŠARŽE)

LOT

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Krabička obsahuje 8 jednorázových aplikátorů po 5 g gelu (celkem 40 g gelu).

Výrobce

Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 1, D-23562 Lübeck.

Distributor

Společnost Merck spol. s r. o., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4

CE 0482

Datum poslední revize textu: říjen 2010



MERCK